


Update-Anleitung Corporal A

Wichtig!

Sollten Sie eine **Softwareversion 1.3** oder älter haben, empfehlen wir **NACH** der Datensicherung das Entfernen des Corporal-Programms (siehe Punkt 5.). Die Versionsnummer finden Sie im geöffneten Corporal-Programm unter „Hilfe-Programminformation“.

Vorgehensweise für Updates ab Version 1.4.0.5 oder höher

1. Systemvoraussetzungen:
 - Betriebssystem mindestens Windows XP oder höher
 - voll funktionsfähige USB 2.0-Schnittstelle
2. Schließen Sie alle Anwendungsprogramme Ihres Computers.
3. Führen Sie eine Sicherung der aktuellen Datenbank durch. Öffnen Sie dafür die Corporal-Software und klicken „Optionen - Datenbankbackup“ an.

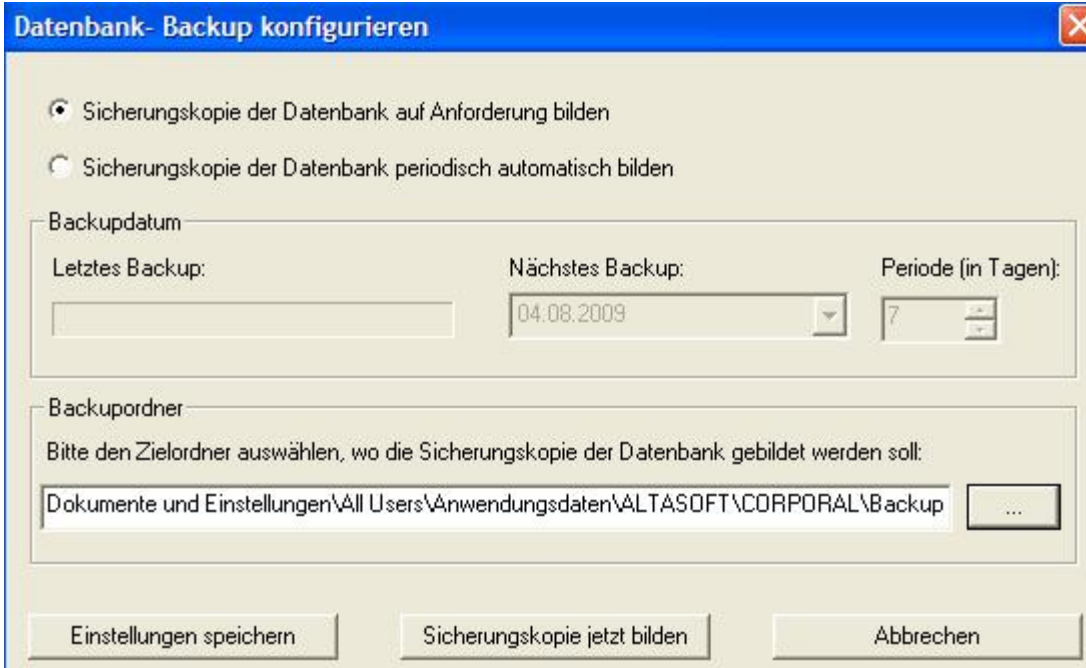

Sie können eine Sicherung im standardmäßig angegebenen Backupordner machen oder einen anderen Pfad wählen, z.B. eine Sicherung auf einen Memory-Stick vornehmen. Klicken Sie dafür auf den Button mit den drei Punkten rechts neben dem Zielordner und wählen den gewünschten Pfad. Klicken Sie nun auf „Sicherungskopie jetzt bilden“. Schließen Sie das Corporal-Programm.

4. Lösen Sie die USB-Verbindung des Eingabegerätes mit dem Computer, indem Sie den USB-Stecker ziehen.
5. **Führen Sie diesen Schritt nur aus bei Softwareversionen, die älter als 1.4.0.5 sind! Haben Sie eine Version höher als 1.4.0.5 fahren Sie bitte direkt mit Punkt 6 fort!**
Über den „Start“-Button links unten am Bildschirm: „Start-Systemsteuerung-Software“ die Corporal-Software auswählen und „Entfernen“ bestätigen.
6. Starten Sie das von der Vistec-Support Homepage heruntergeladene Setup durch Doppelklick. Folgende Meldung erscheint.




Klicken Sie auf „Ausführen“.

Nach Auswahl der Sprache erscheint folgendes Fenster:



Mit „Ja“ bestätigen.

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms, bis folgendes Fenster erscheint:

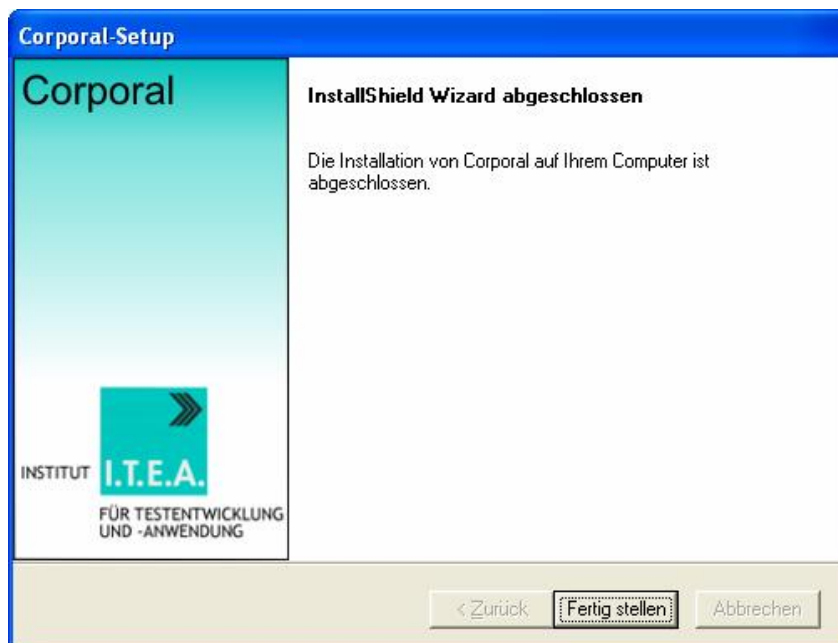

Klicken Sie auf „Fertig stellen“.

8. Stecken Sie den USB-Stecker wieder ein.

9. Öffnen Sie die Corporal-Software erneut und prüfen Sie, ob Ihre Datenbank vorhanden ist. Falls nicht, stellen Sie diese wieder her über: „Optionen- Datenbankordner auswählen“. Stellen Sie hier den Ordner ein, den Sie für die Sicherungskopie verwendet haben.

Wichtig!

Sollten Sie auf einen Memory-Stick oder eine andere externe Quelle gespeichert haben, kopieren Sie vom Stick die Datei „corporal.mdb“ in das Verzeichnis das unter „Datenbankordner auswählen“ angewählt ist.